

『減塩モニタ』

塩分摂取量簡易測定器

1日あたりの塩分摂取量を
早朝尿から測定



ご注意 本測定器は医療機器ではありません
したがって診断治療には使うことができません



(株)河野エムイー研究所

減塩モニタの使い方



夜間尿(夜途中で起きた場合)
と早朝尿を全量カップに入れる



センサー部を
尿に差し込む



電源スイッチを長押し
(約1秒) 液晶が点滅



1日あたりの塩分
摂取量を表示



電源スイッチを長押し
(約2秒) 表示が消える
押さなくても自動的に消える



測定値を後で見たいときは、
電源を押し「8.8.8」となって
からもう一度電源を押す

使用後の洗浄とご注意

以下の から を2回程度繰り返してください 空のカップに差し込んで保管してください



減塩モニタをカップ
からはずす



尿を捨てる



カップに
水を入れる



減塩モニタを差込み
軽くゆする



本体、センサーを
流水で洗わない



本体を水で洗わない

センサーの付け根と電池カバー部は
水の浸入がしやすくなっています。
水が浸入しないようご注意ください。

